

Serviceföreskrift hjärtstartare

Kontroll bör utföras en gång om året av utbildad serviceperson.

1. Kontrollera att det finns en person som har utsetts till ansvarig för hjärtstartare i den aktuella verksamheten. Kontrollera även att det finns instruktioner för att utföra egna kontroller av hjärtstartaren samt att dessa följer tillverkarens rekommendationer.
2. Om larmfunktion finns i tillhörande skåp skall detta testas.
3. Okulärbesikta hjärtstartare.
4. Rengör hjärtstartare och skåp.
5. Utför självtest.
 - Ta ur batteriet och sätt därefter tillbaka det, självtest startas. Följ hjärtstartarens instruktioner.
 - Batteri, kontrollera bäst-före-datum.
 - Elektroder, kontrollera bäst-före-datum.
 - Byte av elektroder ska ske vart annat år, medan byte av batteri ska vart fjärde år.
6. Skåp och väska plomberas efter genomförd kontroll.